Bischoff & Bischoff

Manual de instrucciones



Enjoy mobility.





TS-1 (Silla de ruedas para baño)

Estimado cliente:

Con la adquisición de esta silla de ruedas para baño B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento de la silla de ruedas para baño B+B y así sentirse más seguro.

Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de una mayor movilidad.

1. Atención: indicaciones de seguridad (Análisis de riesgo según DIN EN 13485)

- Peso máximo del usuario: 120 kg.
- Utilice la silla de ruedas para baño siempre con la ayuda de otra persona.
- Utilícela solo en superficies llanas y horizontales.
- Durante el uso bloquee las ruedas de freno.
- Evite apoyarse en los laterales. Existe riesgo de volcar.
- Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos del respaldo.
- Debe garantizarse un uso correcto de la silla de ruedas para baño, especialmente por parte de los niños.

El empleo de una silla de ruedas de baño es necesario cuando el uso o el alcance del inodoro con motivo de la incapacidad no es posible.



Revestimiento del respaldo - Perno de retención para el reposabrazos -

Pemo de retención para el reposapiemas Reposapiemas Rueda directriz delantera, sin freno

Respaldo extraíble Reposabrazos desplazable y acolchado Cojín de asiento Tornillo de fijación para el respaldo Orinal con tapa Rueda directriz trasera, con freno -



Fig. 1

2. Freno de estacionamiento

Las dos ruedas directrices traseras de la silla de ruedas para baño pueden bloquearse para evitar que la silla marche sola.

Cómo bloquear la silla:

 Presione la palanca de freno hacia abajo con el pie hasta llegar al tope (fig. 2)

Cómo desbloquear la silla:

• Tire de la palanca de freno hacia arriba con la punta del pie (fig. 2).

3. Reposapiernas

Para que pueda sentarse y levantarse de la silla de ruedas para baño B+B de la forma más cómoda posible, si lo necesita, puede desplazar los reposapiernas hacia fuera sin tener que desmontarlos.

- Apriete el perno de retención ligeramente hacia dentro (fig. 3) y abra así el dispositivo de bloqueo.
- Desplace los reposapiernas hacia fuera.
- Si es necesario, pliegue los reposapiés hacia delante.
- Para volver a la posición original, pliegue los reposapiernas hacia delante y bloquéelos.
- Para extraer los reposapiernas, proceda de la siguiente forma:
- Apriete el perno de retención hacia dentro (fig. 3)
 y abra así el dispositivo de bloqueo.
- Desplace los reposapiernas hacia fuera.
- Tire de los reposapiernas hacia arriba.



Existe riesgo de caída.

Al levantarse de la silla de ruedas para baño no pise los reposapiés en ningún caso.



Fig. 2



Fig. 3





4. Tapa del inodoro

Cómo extraer la tapa del inodoro:

- Tire del borde delantero del asiento hacia arriba para extraerlo del soporte.
- · Levante la tapa.

Cómo colocar la tapa:

- Desplace el borde trasero del asiento hacia atrás con los laterales abiertos.
- Presione los bordes redondeados delanteros hacia abajo hasta llegar al tope. El asiento tiene que encajar.
- Compruebe la correcta colocación del asiento.



Fia. 5

5. Reposabrazos

Los reposabrazos pueden desplazarse hacia abajo.

- Para ello extraiga el botón de bloqueo y desplace los reposabrazos hacia abajo (fig. 4).
- Para volver a la posición original desplace los reposabrazos hacia arriba hasta llegar a la posición inicial y oír cómo encaja el perno de bloqueo.



Asegúrese de que al desplazar los reposabrazos no haya nadie detrás de la silla de ruedas para baño.

6. Datos técnicos

Anchura del asiento:	45 cm
Profundidad del asiento:	44 cm
Longitud:	96 cm
Altura:	97 cm
Anchura:	56 cm
Asiento hasta los reposabrazos:	22 cm
Asiento hasta el respaldo:	34 cm
Peso máximo del usuario:	120 kg
Peso:	15,3 kg



Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Silla de ruedas para baño TS-1 Modelo: 2002

Número de serie:*

(debe anotarlo el distribuidor)

Distribuidor:

Fecha y sello

^{*} Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 Fax:+49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com info@bischoff-bischoff.de







