


GUÍA DE INSTALACIÓN

ADAPTADOR FREEWHEEL PARA SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES

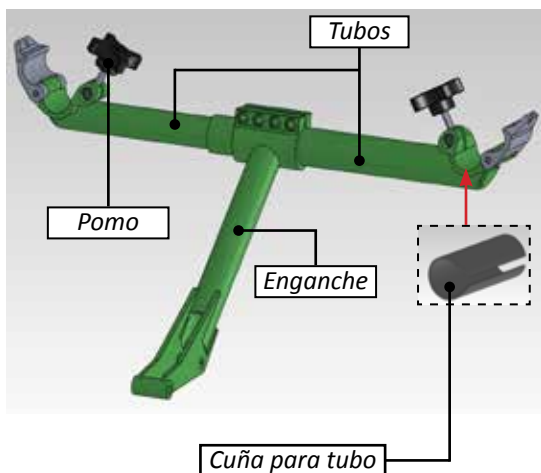


NOTA: Video de instrucciones en la pestaña de Galería, en la sección de Videos de Montaje, en la página web:

www.interortho.es/freewheel

PASO 1: Preparación Previa


1. Separar los Tubos
2. Deslizar el enganche por el tubo más ancho. Deslizar el otro tubo volviendo a juntar ambos tubos (quedando el enganche con ambos tubos introducidos).
3. Abrir los Pomos y quitar las cuñas para tubo.

PASO 2: Fijar el adaptador FW a la silla de ruedas

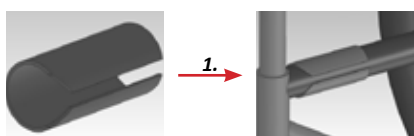

1. Coloque las cuñas para tubo en los tubos horizontales de la silla de ruedas.

Nota: Las Cuñas para Tubo no son necesarias si el tubo de la silla de ruedas es de **1,18" (3 cm)**

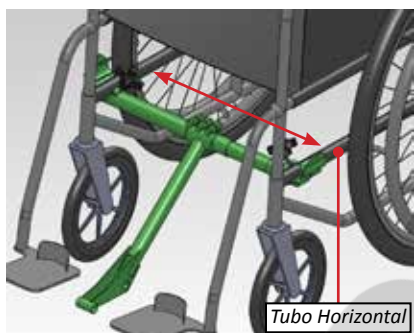

2. Deslice el tubo de menor diámetro del adaptador FW, hasta ajustar al ancho de la silla de ruedas. Posteriormente cierre las abrazaderas de los extremos sobre los tubos laterales de la silla de ruedas.




3. Asegure las abrazaderas desaflojando el pomo, haciendo que el tornillo encaje en la ranura de la abrazadera para posteriormente volver a apretar el pomo.





4. Mover el enganche hasta situarlo completamente en el centro de los tubos horizontales de la silla de ruedas.

PASO 3: Acoplar la FreeWheel

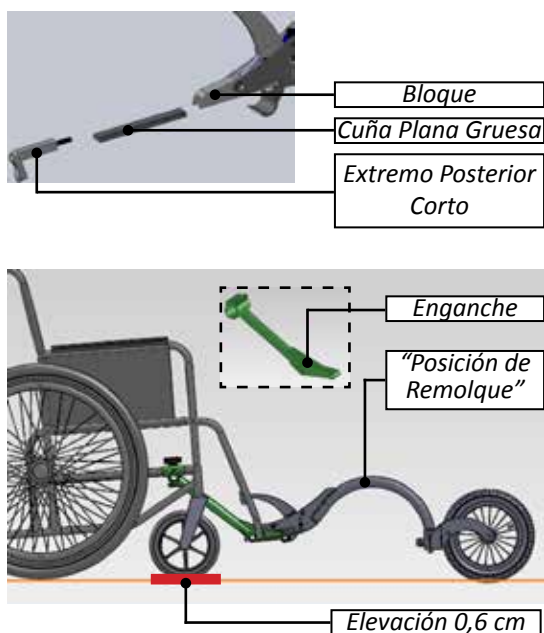

1. Cortar 1" (2,54 cm) de la Cuña Plana Gruesa que viene con la FreeWheel y deslizarla en la ranura del bloque superior del sistema de anclaje de la FreeWheel.
2. Insertar el Extremo Posterior Corto que viene con la FreeWheel y atornillarlo sin apretar completamente al bloque superior del sistema de anclaje de la FreeWheel, para dejar un pequeño hueco.
3. Eleva las ruedas delanteras de la silla de ruedas aproximadamente 1/4" (0,6 cm)
4. Ancla la FreeWheel al enganche con la FreeWheel en posición de "remolque" tal y como muestra la figura.

PASO 4: Ajustes finales

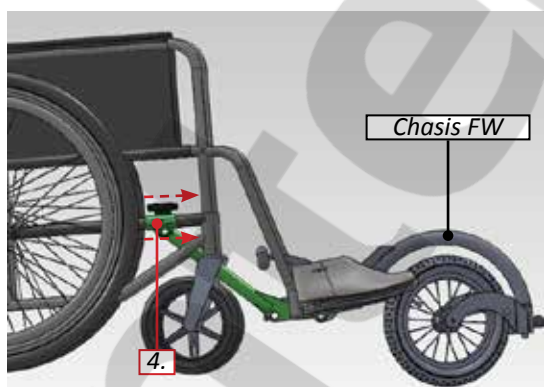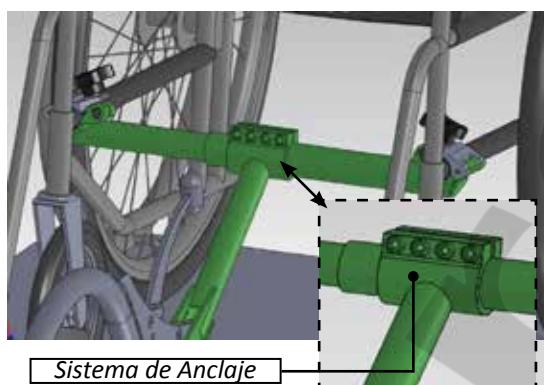

1. Para empezar, apriete ligeramente los 4 tornillos del sistema de anclaje. Es importante no apretar completamente cada tornillo, si no que ir apretando un poco cada uno de los tornillos, y repetir la operación sucesivas veces.
2. Seguir apretando siguiendo el método anterior hasta que todos los tornillos estén completamente apretados y seguros (20 ft-tbs).
3. Sentarse en la silla y hacer rotar la rueda por debajo del chasis de la FreeWheel.
4. Si los dedos de los pies del usuario tocan la rueda. Desenroscar los pomos y deslizar el adaptador hacia delante por los tubos horizontales de la silla.

Por favor consulte el Manual de Instrucciones FreeWheel para afinar los ajustes.
Para más información o preguntas por favor contacta con nosotros:
email: info@interortho.es Web: www.interortho.es/freewheel