

# MANUAL DE USO RAMPA SKY TELESCÓPICA

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la rampa.

## **Descripción del producto**

Abra la caja de embalaje para comprobar que no se han producido desperfectos durante el transporte. En caso de que se hubieran producido daños contacte con el comercio en el que adquirió el producto.

La rampa de aluminio ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas de ruedas u otros productos similares.

## **Precauciones**

El peso máximo soportado por la rampa es de 300 Kg.

Al utilizar la rampa distribuya el peso de manera uniforme.

Preste atención a que la rampa no esté mojada, ya que puede volverse resbaladiza. Manténgala limpia y seca para su correcto funcionamiento.

Tenga en cuenta que cuando suba la rampa con una silla o scooter no puede superar el ángulo de inclinación que el fabricante recomienda para su silla.

## **Modelos de rampa**

NOMBRE	REFERENCIA	LONGITUD	PESO SOPORTADO
Rampa Sky telescópica 21 cm (110-150)	0401072	110-150 cm	300 Kg
Rampa Sky telescópica 21 cm (140-210)	0401073	140-210 cm	300 Kg
Rampa Sky telescópica 25 cm (95-120)	0401071	95-120 cm	300 Kg
Rampa Sky telescópica 25 cm (140-210)	0401070	140-210 cm	300 Kg

## **Montaje**

Saque la rampa de la caja y colóquela contra una superficie plana y nivelada. A continuación suelte las pestañas de metal que cierran la rampa y tire de la rampa hasta conseguir la longitud deseada.

Para bloquear la rampa y que no se mueva, cierre la pestaña de metal.

Una vez que las dos partes de la rampa tengan la misma longitud, colóquelas en el obstáculo a salvar, teniendo cuidado de que ambas partes estén paralelas y a la misma altura.

Para plegar la rampa solo tiene que soltar la pestaña metálica, empujar la hoja de la rampa hacia adentro y volver a colocar la pestaña metálica para cerrarla.

### **Mantenimiento**

Para limpiar la rampa utilice un paño húmedo con agua jabonosa. Seque bien la rampa después de limpiarla. No utilice en ella productos abrasivos.

### **Garantía**

La rampa tiene una garantía de 2 años en los defectos de materiales o de fabricación. Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso de que requiera de reparación póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió la rampa.



### **Apex Medical S.L.**

C/ Elcano 9, 6ª Planta

48008 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA

tel. +34 944 70 64 08 - fax. +34 944 70 64 09

E-mail: [info@apexmedical.es](mailto:info@apexmedical.es)

Web: [www.apexmedicalcorp.com](http://www.apexmedicalcorp.com)



**WONSH RAMP INDUSTRY CO. LIMITED**  
15 Nanqiu Road, Huangtu Zhen,  
Jiangyin city, Jiangsu Prv.  
P.R. China 214445



MEDevice Union, Ltd  
26 York Street  
London, United Kingdom W1U 6PZ